

レーザー光 遮断・保護ノパッド

～レーザー治療中の光に対し、患者様の目の保護に役立ちます～

●ご使用方法

- 本品ノパッドを患者様の眼部の形に合わせるように、**手で湾曲**にベンディングします。【着用例：写真1】
- 本品ノパッドを眼部上に乗せ、最適な湾曲に再度ベンディング（微調整）し直すだけで、セット終了です。【着用例：写真2】

※ご注意

- ・セットした際、外部の光が目に差し込まないことを患者さんへご確認ください。
- ・万が一セットされたパッドが術中、装着位置が動く危険性があると考えられる場合、患者様の同意のもと、絆創膏等でそのパッドを動かないよう固定して下さい。

【レーザーパッドの着用例】



写真1

●その他の禁忌事項

- パッド外周面に、亀裂や凸凹が生じた場合は、ご使用されないようにご注意ください。
- パッド内部の金属が、金属疲労により破損した場合は危険ですので、ご使用されないようにご注意ください。
- レーザー治療中は、絶対にセットされたパッドを外したり、装着位置を変えないようにして下さい。
※レーザー光による**失明の危険性**がございます。
- パッドの洗浄は、水洗いもしくは中性洗剤をご使用して下さい。
- 消毒を必要とする場合、表面を軽く「アルコール拭き」を行って下さい。※滅菌不可



写真2

- 製品ラインアップ ※本品は、予告なく仕様変更する場合がございます。



品番	ABE-A
色	アイボリー
1セット	2枚入り
クラス分類	クラス I
届出番号	15B1X10003000011

JMR株式会社



Japan Medical Research

〒959-0511
新潟県新潟市西蒲区大原3061
TEL:0256-77-8808
FAX:0256-77-8809
E-mail:info@jmr-lab.com